

Flexi-Aid Kusyen Bulat Kembung

- Reka bentuk jenis 'multi chamber' yang baru
- Pengagihan berat badan secara rata pada kusyen dengan berkesan
- Mudah dibawa

Flexi-Aid Kusyen Bulat Kembung adalah bersesuaian untuk individu yang duduk terlalu lama sama ada di rumah atau di tempat kerja. Reka bentuk kusyen berongga boleh mengelakkan berlakunya geseran dan reka bentuk 'multi chamber' boleh meningkatkan kekuatan kusyen.

Cara Penggunaan

Pengembungan

1. Tarik keluar penutup injap udara.
2. Mengembungkan kusyen dengan udara sehingga mencapai lebih kurang 80%.
3. Pasang semula penutup untuk menutup injap udara.

Pengempisan

1. Tarik keluar penutup injap udara.
2. Picit bahagian bawah injap udara untuk mengeluarkan udara dalam kusyen.

Ciri-ciri

- Reka bentuk kusyen berongga boleh mengelakkan berlakunya geseran pada lokasi buasir dan luka lepas bersalin.
- Kusyen yang dihasilkan dengan bahan yang sangat fleksibel boleh menyokong berat badan dan juga tekanan pada tulang belakang dengan lebih baik, serta melegakan keadaan tidak selesa yang disebabkan oleh tempoh duduk yang terlalu lama
- Mudah dibawa: Fungsi pengempisan kusyen menyebabkannya senang untuk digunakan di tempat kerja, dalam kereta, semasa duduk di atas kerusi roda dan di luar rumah.

Reka bentuk 'seal chamber'



Pengagihan berat badan secara rata pada kusyen



Perhatian

- Apabila kusyen ini digunakan untuk penjagaan luka trauma selepas pembedahan, sila ikuti arahan pakar perubatan anda.
- Jangan kembangkan kusyen ini secara berlebihan; ini boleh menyebabkan kerosakan pada produk.
- Sila jauhkan produk ini daripada benda yang tajam.
- Penggunaan produk ini oleh kanak-kanak perlulah dibawah pengawasan orang dewasa.
- Jangan gunakan produk ini sebagai alat mainan atau kusyen udara penyelamat.

Jangka hayat: 5 tahun

Buatan Taiwan